

器 74 医薬品注入器  
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ 35384000

## シリンジアダプタ JCR®


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】再使用禁止

#### ※【形状・構造及び原理等】

本品は、ルアーロック型シリンジ製剤に接続できるメス嵌合部と透析用血液回路のアクセスポート等に接続できるオス嵌合部を有する。

#### 【構造図】

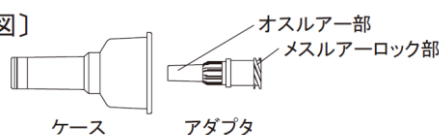

#### 【使用目的又は効果】

注射筒又は注射針等をチューブ、コック、その他の構造に接続する器具。本品は、ルアーロック型シリンジ製剤に接続して、透析用血液回路のニードルレスアクセスポートに差し込む器具である。

#### ※【使用方法等】

1. 使用直前に製品に異常がないことを確認する。
2. 併用する透析用血液回路の添付文書を確認する。
3. フィルムを取り外し、ケースを手に持ち、アダプタを『エポエチンアルファ BS 注シリンジ「JCR」』、ならびに『ダルベポエチンアルファ BS 注シリンジ「JCR」』に、緩みや外れが生じないように回転させながらしっかりと接続する。
4. ケースを外し、透析用血液回路のニードルレスアクセスポートに、オスルアー部をまっすぐ挿入する。

#### ※＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 嵌合部に薬液を付着させないこと。[嵌合部の緩み等が生じる可能性がある。]
- 予め接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。また、使用中は緩み、外れがないことを確認する。

#### ※【使用上の注意】

- 本品は、製造販売元；JCRファーマ株式会社（販売元：キッセイ薬品工業株式会社）製の『エポエチンアルファ BS 注シリンジ「JCR」』、ならびに『ダルベポエチンアルファ BS 注シリンジ「JCR」』専用品であり、それ以外のものには使用しないこと。
- 使用前に使用期限を確認し、期限が過ぎている場合は、使用しないこと。
- 本品はγ線滅菌済である。包装が破損、汚染している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は、使用しないこと。

- 使用中、本品に血液／薬液の漏れ、空気の吸い込み等の異常が生じた場合、直ちに医師の指示に従い処置すること。
- 本品が汚染されないように開封し、開封後は直ちに使用すること。
- 接続部を汚染させないこと。
- 使用中は本品の破損、接合部の緩み及び薬液漏れ等について確認すること。
- 使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### ＜貯蔵・保管方法＞

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

##### ＜有効期間・使用の期限＞

使用期限を個別包装及び100本入り箱に表示（自己認証による）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元及び製造元：株式会社 共和製作所  
住 所：〒313-0124  
茨城県常陸太田市大平町 930-3  
電話番号：0294-76-1211